

## Hoverjack, de patiëntenlift om te tillen zonder fysieke inspanning



### Wat kunt u met de Hoverjack?

Met de Hoverjack kan een patiënt comfortabel in een liggende positie van de grond naar een bed of stretcher worden getild zonder dat het personeel een fysieke inspanning hoeft te leveren.

### Hoe werkt de Hoverjack?

De Hoverjack bestaat uit vier verschillende luchtkamers. De Hoverjack dient op de vloer naast de patiënt te worden geplaatst, waarbij de luchtkamer met ventiel nr. 4 bovenop ligt. De patiënt dient op de nog niet opgeblazen Hoverjack te worden gerold en vervolgens moet allereerst luchtkamer 1 met de luchtpomp worden opgeblazen, gevolgd door de luchtkamers 2, 3 en 4. Wanneer een luchtkamer is opgeblazen, sluit het ventiel automatisch. Als alle kamers zijn opgeblazen, kan de patiënt worden verplaatst naar het aangrenzende bed of stretcher. Om dit zonder fysieke belasting te laten plaatsvinden, adviseren wij u de Hovermatt hiervoor te gebruiken.

### De voordelen van de Hoverjack op een rijtje:

- Comfortabel
- Eenvoudig in gebruik
- Geen fysieke overbelasting
- Ook geschikt voor zwaardere patiënten
- Ideaal voor ambulancepersoneel.

**Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 - 620535**