

## Transferhulpmiddelen - Positioneren



### De toepassing van transferhulpmiddelen met een positioneringfunctie.

Vitaflex heeft in haar assortiment een groot aantal transferhulpmiddelen, die bedoeld zijn om patiënten op dezelfde plek te herpositioneren. Te denken valt aan hulpmiddelen om patiënten om te draaien in bed of om patiënten hogerop in bed te plaatsen. In deze brochure vindt u een overzicht van deze handige hulpmiddelen.

### WendyLett

WendyLett glijzeilen worden gebruikt voor mensen die moeite hebben om te draaien in bed als gevolg van rugpijn of een lichte handicap.



Het systeem blijft permanent in bed liggen. Gezien de structuur van de stof (katoen met satijn) is alleen een zijwaartse transfer mogelijk (niet hoog laag).

Het centrale gedeelte van de WendyLett is zeer zacht om frictie te verminderen en het zorgt ervoor dat er gemakkelijk gedraaid kan worden, zonder al te veel kracht te moeten gebruiken. Antislip stroken aan de zijkant van het systeem voorkomen dat er te ver doorgedraaid wordt.



## Transferhulpmiddelen - Positioneren

De WendyLett is verkrijgbaar in wit of blauw/wit gestreepte varianten en in 3 maten.

Naast de WendyLett is ook nog verkrijgbaar de WendyLett2Way, die een transfer in 2 richtingen mogelijk maakt en de WendyLett4Way voor transfers in 4 richtingen. Deze beide uitvoeringen worden geplaatst boven op de basis WendyLett.

---

### WendyLean

De WendyLean is een kussen, dat wordt gebruikt om patiënten in bed hogerop te plaatsen.



De WendyLean is voorzien van handgrepen, gemaakt van polyester en katoen en heeft een blauw-wit streepdessin. De onderzijde van het kussen is gemaakt van zeer zacht satijn, dat het eenvoudig maakt om het kussen onder de schouders te krijgen wanneer een patiënt hogerop in bed moet worden geplaatst of in een zittende positie in bed gebracht moet worden.



### TurnSheet

De TurnSheet is bedoeld voor zijwaartse en hoog/laag transfers voor passieve (zware) personen met een ernstige handicap. Als personen regelmatig omgedraaid moeten worden of wanneer er kans is op doorliggen is de TurnSheet de oplossing.



De TurnSheet bestaat uit een matras cover gemaakt van ULF (Ultra Low Friction) en een top systeem van zachte microfibers met een dunne vulling.

De TurnSheet wordt geplaatst onder het hoofd, de schouderbladen en de heupen, maar niet onder de benen. Dit houdt in dat zorgverleners kunnen assisteren bij het veranderen van positie.



## Transferhulpmiddelen - Positioneren

De matras cover is uitgerust met sluitbare flappen die voorkomen dat de patiënt uit bed kan glijden.

Ook de zijstroken van het systeem bestaat uit een remstrip, die uit bed glijden voorkomt. De TurnSheet kan op een anti-decubitus matras gelegd worden.



---

### TopSheet

De TopSheet is een incontinentiebescherming annex draaisysteem dat boven op een TurnSheet wordt gebruikt.



De bovenkant van de TopSheet is gemaakt van een super absorberend materiaal. De oppervlakte waar de patiënt op ligt is van een zacht soort polyester. Het voelt altijd droog aan en het helpt om te beschermen tegen druk.

De sterke lussen kunnen gebruikt worden om de TopSheet aan te haken aan een plafondlift of een passieve lift om op een veilige manier te kunnen draaien.

### SitWalk

De SitWalk is ontworpen om patiënten verder achterin de (rol)stoel te verplaatsen. De constructie van de SitWalk is erg sterk. De vier handgrepen aan beide zijden zorgen voor een goede werkpositie en garanderen een sterke stevige grip.



---

### EasySlide

De EasySlide wordt gebruikt in bed om patiënten te helpen draaien of om hoger op in bed te geraken en om hen te kunnen verplaatsen tussen bed en rolstoel.

De EasySlide heeft een afmeting van 50 x 60 cm. De EasySlide is ook in andere afmetingen verkrijgbaar, maar is dan meer bedoeld voor transfer van patiënten.



---

**Op onze website [www.vitaflex.nl](http://www.vitaflex.nl) kunt u een demonstratievideo van de diverse transferhulpmiddelen met een positioneringsfunctie bekijken.**

**Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.**