

## Transferhulpmiddelen - Ondersteunen



---

### De toepassing van transferhulpmiddelen met een ondersteunende functie.

Vitaflex heeft in haar assortiment een groot aantal transferhulpmiddelen. Een aantal van deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor gebruikers die nog enige kracht hebben. Te denken valt aan patiënten met lichte handicap, waarbij bijvoorbeeld wel sprake is van een sta-functie, maar geen bewegingsfunctie of patiënten met een lichte tot zware handicap, maar die nog wel over een arm- of handfunctie beschikken. De transferhulpmiddelen voor deze groep patiënten ondersteunen de mobiliteit van deze patiënten.

---

### ReTurn 7500

De ReTurn 7500 is een opstahulp die perfect toegepast kan worden bij gebruikers die nog enige kracht hebben om een transfer te maken naar of van bed, rolstoel of toilet en een volledige sta-functie hebben.

De ReTurn was het eerste opsta product op de markt en garandeert een nieuwe manier van denken.



De ReTurn 7500 wordt in die situaties ingezet dat een actieve lift nog een te zwaar middel is. De ReTurn 7500 kan perfect gebruikt worden voor revalidatie en om patiënten te activeren.

## Transferhulpmiddelen - Ondersteunen

De ReTurn 7500 manoeuvreert buitengewoon goed, zelfs met zwaardere mensen en draagt zorg voor een veilige en actieve transfer. De Return Belt kan eventueel als accessoire worden gebruikt om het opstaan te vergemakkelijken.

Return Belt



---

### EasyBelt en FlexiBelt

De EasyBelt en de FlexiBelt worden gebruikt voor zittende transfers of als ondersteuning bij het staan of lopen. De riemen zijn gemaakt van vocht- en faeces resistente nylon en een comfortabele polyester laag voor contact met het lichaam.



De riem wordt gedragen rond de heupen of het middel van de verzorgende, maar kan ook aangebracht worden bij de patiënt.

Er zijn sterke handles die zowel horizontaal als verticaal geplaatst zijn om zo de meest comfortabele greep voor iedere situatie te kunnen creëren.

Mede door de ergonomisch aangebrachte handgrepen kan de hulpverlener vanuit een goede houdingspositie de patiënt begeleiden tijdens het transfer moment (van zit naar opstaan, van opstaan naar zit) of tijdens het begeleiden van de patiënt bij diens loopoefeningen.

### TurnTable

De TurnTable wordt gebruikt om transfers mogelijk te maken naar en van rolstoelen, bedden en het toilet.

De TurnTable is bedoeld voor passieve patiënten met een lichte handicap waarbij wel sprake is van een stafunctie, maar geen bewegingsfunctie.



Door de voeten van de patiënt op het draaiplateau te plaatsen en nadat de patiënt van zit naar staan is gebracht, kan deze om zijn of haar lengte as worden gedraaid zonder dat de patiënt hierbij zijn of haar voeten hoeft te verplaatsen. Vervolgens kan de patiënt in (rol)stoel of op bed plaatsnemen.




De TurnTable is gemaakt van kunststof en is voorzien van geleiders tussen beide schijven en handgreep. De TurnTable is voorzien van een antislipplaat.

## Transferhulpmiddelen - Ondersteunen

### TurnTable Soft



De TurnTable Soft maakt het mogelijk om een patiënt in of uit een auto of een bed te laten komen. De TurnTable Soft moet in het midden van de autostoel worden geplaatst of aan de rand van het bed.

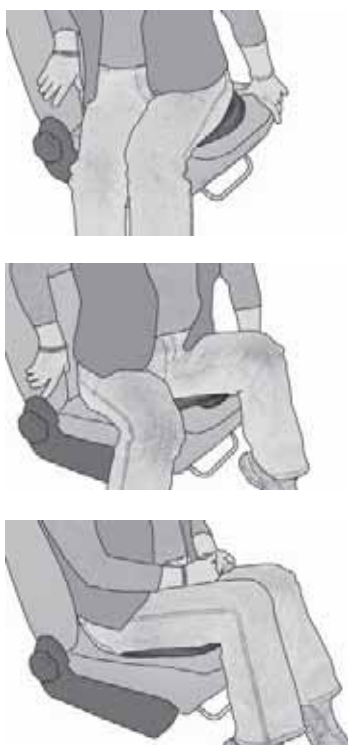

De FlexiGrip is gemaakt van zachte nylon dat vochtresistent is, zodat het gemakkelijk in bed gebruikt kan worden zonder dat het in de weg ligt. De FlexiGrip is gemakkelijk aan te brengen, via een knoop aan het voeteneinde van het bed.

### FlexiMove

De FlexiMove is een veelzijdig hulpmiddel als het gaat om ondersteuning bieden tijdens diverse transfers.



De FlexiMove is door de zorgverlener te gebruiken bij transfers van zitten naar opstaan en andersom, bij transfers in en uit het bed en als ondersteuning te gebruiken bij transfers hoog/laag en zijwaarts in bed. De Fleximove is een soort verlengde arm en vermijdt daardoor ook contact met de patiënt.

De FlexiMove is ook verkrijgbaar in een maxi uitvoering, die geschikt is om patiënten te verplaatsen, te draaien, voor zijwaartse transfers en voor transfers vanaf de grond.

### FlexiGrip

De FlexiGrip kan worden gebruikt door mensen met een lichte tot zware handicap die nog wel beschikken over een arm- of handfunctie.



Op onze website [www.vitaflex.nl](http://www.vitaflex.nl) kunt u een demonstratievideo van de diverse transferhulpmiddelen met een ondersteunende functie bekijken.

Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.