

Novacare APM 220 en APM 420 Matrasvervangende wisseldruksystemen



De toepassing van de NovaCare wisseldruksystemen.

Decubitus is een veel voorkomende complicatie bij mensen die in een ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen. Decubitus is weefselversterf veroorzaakt door de inwerking op het lichaam van druk-, schuif en wrijfkrachten of een combinatie van deze factoren.

NovaCare biedt alternerende matrassen die gebruik maken van drukwisseling van de verschillende cellen. De cellen worden afwisselend opgepompt zodat de druk zich automatisch verplaatst. Wanneer dus één cel leeg is, is de andere vol.

In deze brochure vindt u meer informatie over de 2 volgende NovaCare matrassen:

- **NovaCare APM 220**, voor behandeling van decubitusgraad 1 en 2;
- **NovaCare APM 420**, voor behandeling van decubitusgraad 1, 2, 3 en 4.

Kenmerken van de NovaCare APM 220.



Behandeling van **decubitusgraad 1 en 2**.

Maximale belasting van **130 kg**

De vaste cyclustijd is **10 minuten**.

Extra comfort door **3 statische hoofdcellen**.

Handmatige instelling van druk maakt systeem geschikt voor de ondersteuning van meerdere cliënten.



Novacare APM 220 en APM 420 Matrasvervangende wisseldruksystemen

NovaCare APM 220 is voorzien van een **akoestisch alarm en Ledlampje** voor te lage druk. Ook heeft het systeem een alarm bij spanningonderbreking.

Met **statische stand** voor speciale toepassingen, zoals pijnpatiënten en patiëntenvervoer.

Het **CPR-noodventiel** zorgt voor onmiddellijke ontluchting binnen enkele seconden voor reanimatie.

Uitgerust met een **stille betrouwbare pomp**.

Voorzien van **onknikbare slangen** tussen pomp en matras en een **rekbare, geluidsarme, brandvertragende, gesloten hoes** met rits rondom het gehele oppervlak.

De NovaCare APM 220 is leverbaar in 2 afmetingen: **80 x 200 x 16 cm** en **90 x 200 x 16 cm**.

Kenmerken van de NovaCare APM 420.



Behandeling van **decubitusgraad 1,2, 3 en 4**.

Maximale belasting van **130 kg**

Verschillende cycli met intervallen van **5, 10 of 15 minuten**.

Drie statische hoofdcellen bieden extra comfort.

De druk wordt gecontroleerd d.m.v. **een sensor**.

Het NovaCare APM 420 systeem is voorzien van een eenvoudige **tiptoetsbediening**, die na 3 seconden **automatische geblokkeerd wordt**.

CPR-noodventiel zorgt voor onmiddellijke ontluchting binnen enkele seconden voor reanimatie.

Akoestisch alarm en Ledlampje voor te lage druk. Ook een alarm bij spanningonderbreking.



Zorgstand zorgt voor stopzetting van alterneren gedurende 30 seconden en geeft binnen 2 minuten maximale druk.

De **back-upfunctie** zorgt voor het behoud van instellingen bij wisseling van alternerende naar statische stand.

Uitgerust met **zeer stille, betrouwbare pomp**.

Voorzien van **onknikbare slangen** tussen pomp en matras en van een **rekbare, geluidsarme, brandvertragende, gesloten hoes** met rits rondom het gehele oppervlak.

De Novacare APM 420 is leverbaar in 3 afmetingen: **80 x 200 x 16 cm**, **90 x 200 x 16 cm** en **90 x 210 x 16 cm**.



Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.